






Perfusor® compact^{plus}

KURZ-GEBRAUCHSANWEISUNG



INBETRIEBNAHME UND INFUSIONSBEGINN

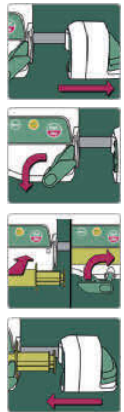

1. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
2. Folgen Sie den Anweisungen im Display:
 - Entriegeln Sie den Antriebskopf mit dem Fixierungshebel.
 - Schieben Sie den Antriebskopf nach rechts.
 - Ziehen Sie den Spritzenbügel und drehen ihn nach links.
 - Legen Sie die Spritze ein, achten Sie auf die korrekte Einlage der Spritzenflügel.
 - Drehen Sie den Spritzenbügel zurück in die Ausgangsstellung.
 - Drücken Sie den Fixierungshebel und schieben Sie den Antriebskopf langsam an die Spritze heran. Bei Erreichen des Spritzenkolbens wird die Spritze automatisch gegriffen.
3. Bestätigen Sie den eingelegten Sprizentyp mit .
4. Stellen Sie die Patientenverbindung her. Je nach letzter Therapie startet die Pumpe automatisch entweder mit der Eingabe der Förderrate oder mit der Auswahl eines Medikaments.
5. Geben Sie die Förderrate mit  ein.
6. Starten Sie die Infusion mit .






FÖRDERRATE ÄNDERN UND TASTATUR SPERREN


1. Stoppen Sie die Pumpe mit .
2. Drücken Sie eine der Pfeiltasten  und geben Sie die neue Rate ein.
3. Drücken Sie , um die Infusion mit der geänderten Rate zu starten.

ALTERNATIVE


1. Um die Förderrate während der laufenden Infusion zu ändern, drücken Sie eine der Pfeiltasten .
2. Geben Sie die neue Rate ein.
3. Drücken Sie , um die Infusion mit der geänderten Rate fortzufahren.

TASTATUR SPERREN: Bei laufender Infusion können Sie die Tastatur vor unbeabsichtigter Betätigung sperren. Drücken Sie dazu auf  und halten Sie die Taste einige Sekunden gedrückt. Im Display wird die Aktivierung angezeigt. Zum Entsperren des Geräts in gleicher Weise vorgehen. Die Tasten  und  sind nicht gesperrt.





SPRITZENWECHSEL

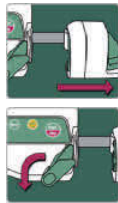1. Stoppen Sie die Pumpe mit .
2. Trennen Sie die Verbindung zum Patienten.

3. Folgen Sie den Anweisungen im Display:
 - Entriegeln Sie den Antriebskopf über den Fixierungshebel und schieben ihn nach rechts.
 - Ziehen Sie den Spritzenbügel und drehen ihn nach links. Halten Sie die Spritze dabei fest.
4. Entnehmen Sie die Spritze und legen Sie eine neue ein (siehe Anleitung unter Punkt „Infusionsbeginn“).






THERAPIE ZURÜCKSETZEN UND NEUE THERAPIE STARTEN

1. Stoppen Sie die Pumpe mit .
 2. Drücken Sie auf  und wählen Sie mit  den Menüpunkt „Therapie zurücksetzen“. Bestätigen Sie mit .
 3. Beantworten Sie die Frage mit „Ja“ oder „Nein“.
- Je nach letzter Therapie befinden Sie sich automatisch im Menüfenster „Rate“ oder in den Auswahlfenstern eines Medikaments.





BOLUSGABE

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten der Bolusgabe:








1. Manueller Bolus:

- Drücken Sie . Die Anzeige „Bolus“ erscheint. Drücken Sie  erneut und halten Sie die Taste gedrückt. Es wird so lange Flüssigkeit appliziert, wie die Taste gedrückt wird oder bis die Maximaldauer/-abgabe erreicht ist.
- Das geförderte Bolusvolumen wird angezeigt. Pro gefördertem 1 ml ertönt ein akustischer Signalton.
- Die Bolusgabe wird durch Loslassen der Taste  beendet.








2. Bolus mit Volumenvorwahl:

- Drücken Sie . Die Anzeige „Bolus“ erscheint.
- Drücken Sie  und geben Sie das gewünschte Bolusvolumen ein.
- Drücken Sie , um die Bolusgabe zu starten.
- Mit  kann die Bolusgabe jederzeit unterbrochen werden.

3) Bolus mit Volumen- und Zeitvorwahl:

- Drücken Sie . Die Anzeige „Bolus“ erscheint.
- Drücken Sie  und geben Sie das gewünschte Bolusvolumen ein. Bestätigen Sie mit .
- Öffnen Sie mit  und  das Vorgabefenster für die Dauer, geben Sie die Bolusdauer ein und starten Sie die Bolusgabe mit .
- Mit  kann die Bolusgabe jederzeit unterbrochen werden.

MEDIKAMENTENDATENBANK (OPTIONAL)

1. Drücken Sie auf  und öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt „Medikament“, Auswahl mit .
3. Falls mehrere Medikamente hinterlegt sind, ggf. Station und Patientenprofil wählen und mit .
4. Medikamentenkategorie wählen und mit , Medikament /Konzentration wählen und mit .
5. Ggf. hinterlegte Informationen lesen und mit .
6. Förderrate eingeben und Infusion mit  starten.

Der Anwender muss sich vor dem Therapiestart vergewissern, dass die in der Pumpe hinterlegte Medikamentendatenbank mit der zu behandelnden Patientenzielgruppe übereinstimmt. Die Bezeichnung der Medikamentendatenbank wird in der Pumpe angezeigt.