



**VIRUZID IN
1 MINUTE**



B. BRAUN VET CARE

Meliseptol[®] acute

ALKOHOLISCHE SCHNELLEDISINFEKTION
FÜR KLEINE FLÄCHEN

Meliseptol® acute

Alkoholische Schnelldesinfektion für kleine Flächen

EIGENSCHAFTEN

- Für medizinisches Inventar und andere alkoholbeständige Oberflächen
- Ohne Amine, quaternäre Ammoniumverbindungen, Aldehyde
- Parfümfrei
- Breites Wirkungsspektrum: bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und fungizid
- Umfassend viruzid: behüllte Viren (inkl. HBV, HCV, HIV) und unbehüllte Viren (z.B. Polio-, Adeno-, Noro- und Polyomaviren)
- Einwirkzeit: 1 Minute (Bakterien, Mykobakterien, Hefepilze und Viren)
- Als Tränkflüssigkeit mit den B. Braun Wipes einsetzbar

VAH-gelistet und in der IHO-Desinfektionsmittelliste

WIRKSPEKTRUM/EINWIRKZEITEN (EZ)

EINSATZGEBIET	NORM	EZ
Flächendesinfektion gemäß VAH bakterizid/levurozid	EN 13727	1 Min.*
	EN 13624	
	EN 13697	
	EN 16615 (4-Felder-Test)	
tuberkulozid/mykobakterizid	EN 14348 EN 16615	1 Min.
fungizid	EN 13624	15 Min.
	EN 13697	30 Min.
viruzid	EN 14476	1 Min.

* Der kürzest mögliche Listungswert beim VAH beträgt 5 Min.

Physikalisch-chemische Daten	Hinweis:
Aussehen: klare Flüssigkeit	Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Für professionelle Verwendung.
Geruch: alkoholartig	
Dichte: 0,94 g/ml bei 20°C	
pH-Wert: 2-3	
Flammpunkt: +33,5°C	

Meliseptol® acute – Auszug aus den Produktinformationen

100 g Lösung enthalten: Propan-1-ol 39,0 g, Glykolsäure 0,98 g, Hilfsstoffe.

Angaben gemäß Gefahrstoffverordnung:

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ausbringung max. 50 ml/m².

Die Produktmarke „Meliseptol“ ist eine eingetragene Marke der B. Braun Melsungen AG. Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Information über unsere Erzeugnisse verwendet werden. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

VIRUZID IN 1 MINUTE



HINWEISE ZUR ANWENDUNG UND DOSIERUNG

Meliseptol® acute aus der Dosierflasche auf ein Einmaltuch gießen und die Flächen vollständig benetzen. Oder die zu behandelnde Fläche bis zur vollständigen Benetzung mithilfe der Sprühflasche einsprühen und das Desinfektionsmittel mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten siehe Tabelle. Die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden. Nicht auf heißen Flächen oder an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten anwenden. Alkohol- und säureempfindliche Materialien (z. B. Acrylglas) vorher auf ihre Beständigkeit gegenüber Meliseptol® acute prüfen.

LIEFERFORM	VE	Art.-Nr.
750 ml-Sprühflasche	12	180243
5 Liter-Kanister	1	180245