

Askina® Soft Clear I.V.

Transparenter Fixierverband für Venenverweil-Kanülen



Wunde

Ideale Fixierung
für Vasofix® Safety

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Askina® Soft Clear I.V.

Transparenter Fixierverband für Venenverweil-Kanülen



Askina® Soft Clear I.V. besitzt einen Schlitz im Wundpad und dient der leichten und sicheren Fixierung von Kanülen. Es besteht hierbei ein hoher Infektionsschutz durch die transparente Trägerfolie. Das integrierte Wundpad nimmt eventuell auftretende Blutropfen auf. Verklebungen mit der Punktionsstelle werden vermieden.

Vorteile von Askina® Soft Clear I.V.

- › Ermöglicht eine leichte und sichere Fixierung von Venenverweil-Kanülen
- › Transparent, ermöglicht den Blick auf die Einstichstelle
- › Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- › Sanfte Entfernung des Pflasters
- › Undurchlässigkeit für Flüssigkeiten und Bakterien von außen
- › Einfache Anwendbarkeit
- › Stark saugfähiges Insel-Pad
- › Extra-Tupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- › Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebkraft
- › Abgerundete Ecken verhindern ein Aufrollen des Verbandes
- › Abrechenbarer Sprechstundenbedarf



Medikamente können mit Hilfe des integrierten Zuspritzports verabreicht werden. Setzen Sie die Spritze (Luer-Slip- oder Luer-Lock-Mechanismus) mit einer leicht drehenden Bewegung auf. Das Ventil öffnet und schließt automatisch.



Bei längeren Unterbrechungen der Infusion empfehlen wir den Vasofix®-Mandrin, der auf den Kanülenansatz aufgeschraubt wird.

Produkt	Größe	VE	PZN	REF
Askina® Soft Clear I.V.	8 x 6 cm	50 Stück	10413602	9086893
				