
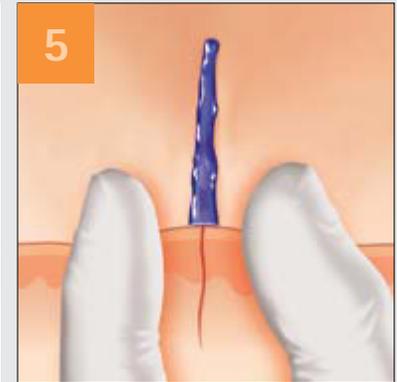
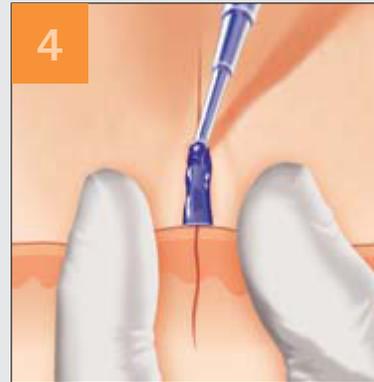
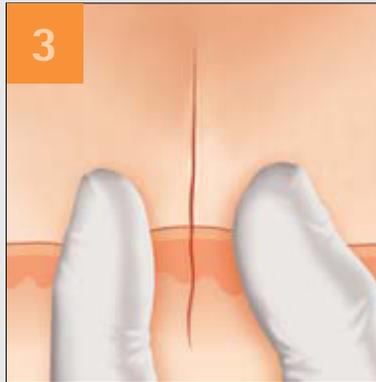


# Histoacryl®

## Applikation

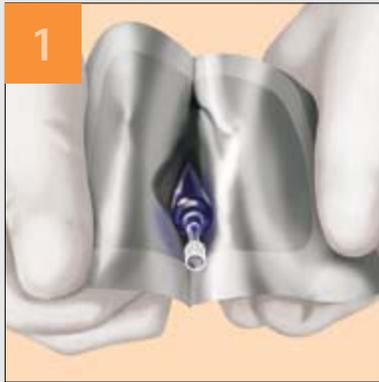

### Öffnen der Peel Verpackung

- ▶ Reinigung der Wunde
- ▶ Ausschütteln der Flüssigkeit aus der Ampullenspitze

### Abdrehen der Ampullen- spitze

- ▶ Druckfreies halten der Ampulle am unteren Ende
- ▶ Abstand zu den Augen halten

### Adaption der Wundränder

- ▶ Halten der Wundränder mit einer Pinzette oder per Hand

### Dünnschichtige Applikation von Histoacryl®


- ▶ Kein Einbringen der Flüssigkeit in die Wunde als Voraussetzung für eine ungestörte Wundheilung

### Halten der Wundränder für ca. 60 Sekunden

- ▶ Verhindert das Auseinanderweichen der Wundränder bis zum Erreichen der geforderten Festigkeit

# Histoacryl®

Erprobt, bewährt, zuverlässig

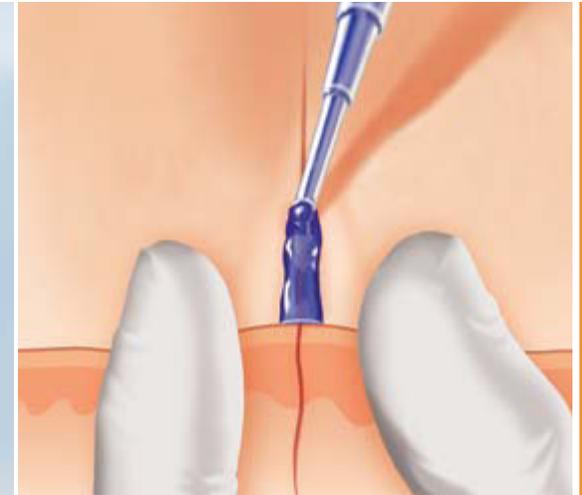

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nr.
5 x 0.5 ml	blau	105 0052
10 x 0.5 ml	blau	105 0044
5 x 0.5 ml	transparent	105 0060
10 x 0.5 ml	transparent	105 0071

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE