Vorbereitung einer Infusion mit Infusionsfilter



Bereitstellung aller benötigten Materialien und Produkte wie Infusionsfilter, Infusionsbesteck, Infusionslösungsbehälter und Nierenschale.




Abdeckfolie des Infusionslösungsbehälters Ecoflac® Plus entfernen. Bei Verwendung eines anderen Behälters ist ggf. zusätzlich eine Desinfektion des Ports notwendig.



Schutzkappe des Einstechdorns abziehen.



Den aufrecht stehenden Infusionslösungsbehälter anstechen. Dorn gleichmäßig ohne Drehen senkrecht in die Membran des Behälters stechen. Das Verbindungsstück zwischen Tropfkammeroberteil und -unterteil dient als Fingerstopper.

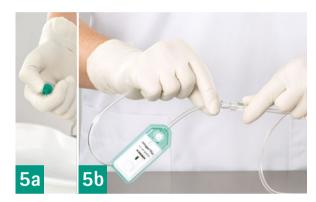

- 5a PrimeStop-Kappe vom Infusionsbesteck und Schutzkappe vom Filteransatz entfernen.
- 5b Infusionsbesteck mit dem Filteransatz verbinden.



- Rollenklemme vor dem Aufhängen des Infusionslösungsbehälters schließen.
- 6b Durch Pumpen des Tropfkammerunterteils den Flüssigkeitsspiegel bis zum Ring einstellen.



Den Filter unterhalb des Infusionsbehälters halten. Rollenklemme des Infusionsbestecks öffnen und Schlauch und Filter für die Entlüftung vollständig füllen. Sicherstellen, dass keine Luftblasen auf der Patientenseite (gerippte Seite) des Filters oder im Verbindungsschlauch vorhanden sind.



Rollenklemme schließen.



- 9a Wenn Luftblasen vorhanden sind, Rollenklemme etwas öffnen und Filter und Schlauch leicht mit dem Finger anschnipsen, bis alle Luftblasen entfernt sind.
- **9b** Rollenklemme schließen.



Ventile desinfizieren. Schutzkappe vom männlichen Luer-Lock-Anschluss entfernen und an den Gefäßzugang anschließen.



Datum und Uhrzeit gemäß der krankenhausinternen Leitlinien für die Wechselintervalle der Infusionsfilter markieren.



Beginn der Infusionstherapie.

