

Kompatibilität der B. Braun Infusionstechnik mit unseren gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern



Kompatible Pumpengenerationen

Bei sachgemäßem Einsatz und unter Berücksichtigung der Aufbereitungsempfehlungen bestätigt B. Braun die Materialverträglichkeit von **Meliseptol® Wipes sensitive** und **Meliseptol® acute Wipes** für die Reinigung und Desinfektion der Pumpengenerationen:

- Space® plus
- compact plus
- Space®

Relevanz

Anwendungsbereitschaft und hygienische Unbedenklichkeit Ihrer Medizinprodukte sind maßgeblich für eine zuverlässige Versorgung von Patienten. Dies gilt sowohl für den Einsatz im akuten Notfall als auch bei Therapien im OP oder in der Intensivmedizin.

Meliseptol® Wipes sensitive

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher auf Alkoholbasis für empfindliche und hochsensible Oberflächen



Diesen QR-Code scannen oder anklicken für umfassende Informationen zu unseren Meliseptol® Wipes sensitive

Meliseptol® acute Wipes

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher auf Alkoholbasis mit viruzidem Wirkspektrum



Diesen QR-Code scannen oder anklicken für umfassende Informationen zu unseren Meliseptol® acute Wipes

Darüber hinaus stellt B. Braun nach individueller Prüfung Bestätigungen zur Materialverträglichkeit an einer Vielzahl weiterer Medizinprodukte aus. Sprechen Sie uns dazu gern an.

Aufbereitung der B. Braun Infusionstechnik am Beispiel der Space[®] plus

Trennen Sie alle Patientenverbindungen vor der Reinigung/Desinfektion!

Schalten Sie die Space[®] plus Station aus und trennen Sie das Ordnungssystem immer von der Stromversorgung sowie von weiterem Zubehör.



Entnehmen Sie alle Pumpen aus der Space[®] plus Station. Prüfen Sie die Station auf sichtbare Verunreinigungen und wischen Sie diese mit einem gebrauchsfertigen, zugelassenen (fusselfreiem) Desinfektionstuch ab. Entsorgen Sie das Tuch nach Gebrauch.



Bei starker Verunreinigung nehmen Sie den Gehäusedeckel (Cover) der Space[®] plus Station ab und desinfizieren Sie diesen mittels des vorgetränkten Tuches **Meliseptol[®] Wipes sensitive** oder **Meliseptol[®] acute Wipes**.



Desinfizieren Sie mit einem weiteren Tuch die Space[®] plus Pumpen – beginnen Sie mit dem Gehäuse.

In diesem Schritt ist die Vorgehensweise im Rahmen der Routine-Reinigung/-Desinfektion gleich.



Nachdem Sie das Gehäuse vollständig desinfiziert haben, öffnen Sie nun die Frontklappe und desinfizieren die Innenseite.

In diesem Schritt ist die Vorgehensweise im Rahmen der Routine-Reinigung/-Desinfektion gleich.



Nach Beendigung des Reinigungs/Desinfektionsvorgangs UND dem vollständigen Abtrocknen aller gereinigten und desinfizierten Bestandteile des Space[®] plus Systems können Sie die Pumpen wieder in die Space[®] plus Station einsetzen. Der Reinigungs-/Desinfektionsvorgang ist beendet.

Die Strom- und Patientenverbindung können nun wieder hergestellt werden.

